

画像CDの起動方法

- ① 診断画像ディスクをコンピュータのディスクドライブにセットする。
診断画像ディスクの操作画面が表示されます。



画面が自動的に表示されない場合は、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」から診断画像ディスク内の「VIEWER」フォルダを開き、「AFC.exe」をダブルクリックして下さい。



- ② 「専用ビューワで見る」ボタンをクリックします。
詳しい説明を見るときは「ヘルプ」をクリックして下さい。



- ③ 選択画面が表示されます。見たい検査の行をクリックして選択し、「簡易表示」または「表示」をクリックすると専用ビューワが起動して診断画像が表示されます。

- ④ 終了時は画面右上の×をクリックすると画像が閉じます。

ディスクは画面を閉じてから取り出して下さい。画面を閉じずに取り出すとエラーが表示されることがあります。

動作環境

OS : Windows7、WindowsVista、windowsXP SP3
メモリ : 1.5GB以上